

## 3mach<sup>®</sup>-Kappenadapter

**Verwendungszweck:** Zubehör für Kappenadapter im Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach<sup>®</sup>-Kappenadapter (Luer Lock, Steck- und Schlauchadapter mit und ohne Gewinde aus Edelstahl) sind zur Reinigung von medizinischen Instrumenten im Reinigungsprozess einer Reinigungs- und Desinfektionsmaschine bestimmt. Es ist sicherzustellen, dass die Instrumentendurchmesser oder die Steckadapter in die vorgesehenen Silikonkappenöffnungen korrekt eingebracht werden (siehe Gebrauchsanweisung Ventilkappen, G 22). Ferner sind hier Herstellerangaben zur Instrumentenaufbereitung vom Instrumentenhersteller einzuholen.



**Achtung:** Alle 3mach<sup>®</sup>-Kappenadapter müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden. Verschraubte Kappenadapter können sich durch hohe Temperaturschwankungen lösen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Kopplung sich die Luer Lock Adapter nicht untereinander verkanten, um ein Lösen von Hand zu ermöglichen. 3mach<sup>®</sup>-Kappenadapter dürfen nicht an Menschen angewendet werden.

**Hinweis:** 3mach<sup>®</sup>-Kappenadapter benötigen 3mach<sup>®</sup>-Silikonkappen, um medizinische Hohlrauminstrumente reinigen zu können. Befindet sich Restwasser in den Adaptern und Schläuchen, ist dieses zu entfernen. Versprödete oder defekte Kappen müssen ersetzt werden.

**Aufbereitung:** Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C) sowie einsetzbar in medizintechnischen, fraktionierten Vakuumverfahren (134 °C).

**Haftung:** Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach<sup>®</sup>-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach<sup>®</sup>-Produkte und deren Zweckentfremdung.

**Hersteller:** Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany  
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, [www.3mach.de](http://www.3mach.de)

