


3mach®-Schläuche und Schnüre aus Silikon

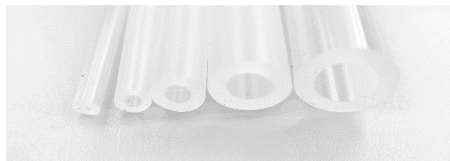

Verwendungszweck: Zubehör für Spülmodule, Edelstahladapter und Siebkörbe im Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach®-Silikonschläuche aus transparentem Silikon (Innendurchmesser 1 – 10 mm in unterschiedlichen Wandstärken) sind zur Weiterleitung von Reinigungslösungen im Reinigungsprozess einer Reinigungs- und Desinfektionsmaschine bestimmt. Es ist dabei zu beachten, dass die Schlauch-Innendurchmesser den angeschlossenen Adapter- oder Spülmodul-Innendurchmessern entsprechen. Silikonschnüre können zur Instrumentenfixierung in Siebkörben eingesetzt werden. Ferner sind hier Herstellerangaben und bekannte Normen zur Instrumentenaufbereitung zu beachten.



Achtung: Alle 3mach®-Schläuche und -Schnüre müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden und sollten nicht offen gelagert werden. Silikonschläuche verändern die Farbe von natur-transparent ins leicht gelbliche, wenn diese dem Tageslicht längere Zeit ausgesetzt sind. Die Reinigungslösungen in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten führen zu einer Versprödung (Verhärtung) der eingesetzten Silikonmaterialien. 3mach®-Silikonprodukte dürfen nicht an Menschen angewendet werden.

Hinweis: Silikonschläuche, die bei der Instrumentenaufbereitung und speziell im Reinigungsprozess eingesetzt werden, sollten nach der Reinigung restwasserfrei sein. Versprödete oder defekte Silikonprodukte sind zu ersetzen.

Aufbereitung: Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C).

Haftung: Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach®-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach®-Produkte und deren Zweckentfremdung.

Hersteller: Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, www.3mach.de

