


## 3mach<sup>®</sup>-Schläuche und Schnüre aus Silikon

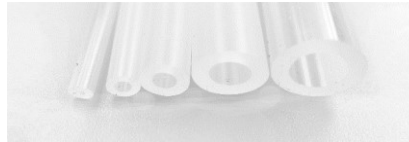

**Verwendungszweck:** Zubehör für Spülmodule, Edelstahladapter und Siebkörbe im Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach<sup>®</sup>-Silikonschläuche aus transparentem Silikon (Innendurchmesser 1 – 10 mm in unterschiedlichen Wandstärken) sind zur Weiterleitung von Reinigungslösungen im Reinigungsprozess einer Reinigungs- und Desinfektionsmaschine bestimmt. Es ist dabei zu beachten, dass die Schlauch-Innendurchmesser den angeschlossenen Adapter- oder Spülmodul-Innendurchmessern entsprechen. Silikonschnüre können zur Instrumentenfixierung in Siebkörben eingesetzt werden. Ferner sind hier Herstellerangaben und bekannte Normen zur Instrumentenaufbereitung zu beachten.



**Achtung:** Alle 3mach<sup>®</sup>-Schläuche und -Schnüre müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden und sollten nicht offen gelagert werden. Silikonschläuche verändern die Farbe von natur-transparent ins leicht gelbliche, wenn diese dem Tageslicht längere Zeit ausgesetzt sind. Die Reinigungslösungen in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten führen zu einer Versprödung (Verhärtung) der eingesetzten Silikonmaterialien. 3mach<sup>®</sup>-Silikonprodukte dürfen nicht an Menschen angewendet werden.

- Hinweis:** Silikonschläuche, die bei der Instrumentenaufbereitung und speziell im Reinigungsprozess eingesetzt werden, sollten nach der Reinigung restwasserfrei sein. Versprödete oder defekte Silikonprodukte sind zu ersetzen.
- Aufbereitung:** Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C).
- Haftung:** Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach<sup>®</sup>-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach<sup>®</sup>-Produkte und deren Zweckentfremdung.
- Hersteller:** Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany  
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, [www.3mach.de](http://www.3mach.de)

