


## 3mach<sup>®</sup>-Silikonringe



**Verwendungszweck:** Zubehör für 3mach<sup>®</sup>-Multisystemkörbe und Korbzubehör im Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach<sup>®</sup>-Silikonringe sind Zubehörprodukte im Bereich der Instrumentenlagerung im Aufbereitungsprozess. Es ist dabei zu beachten, dass die Silikonringe durch scharfkantige Instrumententeile nicht beschädigt werden und diese zwischen den beabstandeten Halterungselementen (Siebkorbformteile, Stufenschrauben etc.) nur leicht gespannt sein dürfen. Gespannte Silikonringe verändern ihre Form mit der Zeit irreversibel.

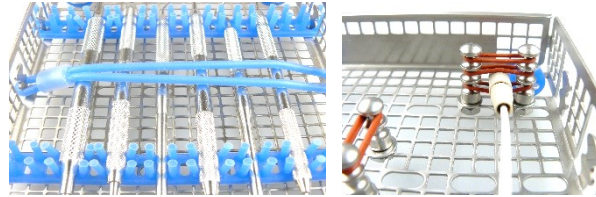

**Achtung:** Alle 3mach<sup>®</sup>-Silikonringe müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden und sollten nicht offen gelagert werden. Die Reinigungslösungen in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten führen zu einer Versprödung (Verhärtung) der Silikonringe. 3mach<sup>®</sup>-Silikonringe dürfen nicht an Menschen angewendet werden.

**Hinweis:** Silikonringe, die bei der Instrumentenaufbereitung und speziell im Reinigungsprozess eingesetzt werden, sollten nach der Reinigung restwasserfrei sein. Versprödete oder defekte Silikonringe an den Adaptern sind zu ersetzen.

**Aufbereitung:** Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C), sowie einsetzbar in medizintechnischen, fraktionierten Vakuumverfahren (134 °C).

**Haftung:** Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach<sup>®</sup>-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach<sup>®</sup>-Produkte und deren Zweckentfremdung.

**Hersteller:** Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany  
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, [www.3mach.de](http://www.3mach.de)

