

3mach[®]-Silikonhülsen und -kappen ohne Ventilfunktion



Verwendungszweck: Zubehör für Spülmodule und Edelstahladapter im Bereich der Instrumentenaufbereitung.

3mach[®]-Silikonhülsen und -kappen ohne Ventilfunktion aus farbigem Silikon sind zur Weiterleitung von Reinigungslösungen im Reinigungsprozess einer Reinigungs- und Desinfektionsmaschine bestimmt. Es ist dabei zu beachten, dass die Silikonhülsen und -kappen den angeschlossenen Adapter- oder Spülmodul-Innendurchmessern entsprechen. Ferner sind hier Herstellerangaben und bekannte Normen zur Instrumentenaufbereitung zu beachten.



Achtung: Alle 3mach[®]-Silikonhülsen und -kappen müssen vor der Erstanwendung gereinigt werden und sollten nicht offen gelagert werden. Die Reinigungslösungen in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten führen zu einer Versprödung (Verhärtung) der eingesetzten Silikonmaterialien. 3mach[®]-Silikonhülsen und -kappen dürfen nicht an Menschen angewendet werden.

Hinweis: Silikonhülsen und -kappen, die bei der Instrumentenaufbereitung und speziell im Reinigungsprozess eingesetzt werden, sollten nach der Reinigung restwasserfrei sein. Versprödete oder defekte Silikonhülsen und -kappen sind zu ersetzen.

Aufbereitung: Geeignet für alkalische Reinigungsverfahren im Bereich der maschinellen Reinigung, Thermodesinfektion und Trocknung (bis 120 °C).

Haftung: Die Firma 3mach GmbH haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der 3mach[®]-Produkte entstehen. Dies gilt ebenfalls für individuell umgebaute und geänderte 3mach[®]-Produkte und deren Zweckentfremdung.

Hersteller: Firma 3mach GmbH, Daimlerstraße 25, 72414 Rangendingen, Germany
Tel.: 0049 (0) 74 71-98 41 18, Fax: 0049 (0) 74 71-98 41 19, www.3mach.de



0483